



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

SOLUSCOPE EZ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SOLUSCOPE SERIE 1

- Τρι-ενζυματικό απορρυπαντικό
- Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια σε βιοφιλμ και πρωτεΐνες
- Συμμορφούμενο με το EN ISO 15883-4
- Συμβατό με μεγάλο εύρος εύκαμπτων ενδοσκοπίων
- Απλή σύνδεση



SOLUSCOPE EZ

Απορρυπαντικό για εύκαμπτα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με το Soluscope Serie 1



SOLUSCOPE SERIE 1

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μη ιονικά και ανιονικά επιφανειοδραστικά
- Συμπλοκοποιητικοί παράγοντες
- Ενζυματικό σύμπλεγμα (πρωτεάση, λίπαση, αμυλάση)
- Έκδοχα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ανοιχτό κίτρινο διαυγές διάλυμα
- Πυκνότητα στους 20°C: 1,09 mg/ml
- pH αραιωμένου προϊόντος (0,25%): περίπου 8,5
- pH καθαρού προϊόντος στους 20°C: περίπου 6,7*
- pH αραιωμένο κατά 0,5%: περίπου 7,6*
- Αγωγιμότητα σε 0,5%: 231 $\mu\text{S}/\text{cm}$

*Μετρήσεις τιμής pH υπό συνθήκες λειτουργίας πάντα με pHμετρο με αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SOLUSCOPE EZ	4 x 5 L	XXXXXX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βιδώστε το έμβολο με το μαύρο καπάκι πάνω στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι η οπή εξαερισμού δεν είναι φραγμένη. Τοποθετήστε το δοχείο στη θέση του και συνδέστε το στο Πλυντήριο - Απολυμαντή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ΠΑ). Αυτοματοποιημένη αραίωση. Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα: 2 μήνες ενώ είναι συνδεδεμένο με το Πλυντήριο-Απολυμαντή (γράψτε την ημερομηνία ανοίγματος στην ετικέτα στο σημείο που προβλέπεται για αυτό το σκοπό).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προσοχή - να τηρούνται οι προφυλάξεις κατά τη χρήση (που καταρτίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων).

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλώ διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Διανέμεται από:
ECOLAB A.E
Λεωφ. Κηφισιάς 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι

ECOLAB®

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com