

TISZTÍTÓSZER ENDOSZKÓPOK GÉPI FERTŐTLENÍTÉSÉHEZ

SOLUSCOPE EZ

**TISZTÍTÓSZER FLEXIBILIS ENDOSZKÓPOKHOZ.
KIZÁRÓLAG A SOLUSCOPE SERIE 1 KÉSZÜLÉKKEL
HASZNÁLHATÓ**

- 3 enzimet tartalmazó tisztítószer
- Bizonyított hatékonyság a biofilm és a fehérjék ellen
- Megfelel az EN ISO 15883-4 szabványnak
- Kompatibilis a flexibilis endoszkópok széles választékával
- Biztos csatlakozás



SOLUSCOPE EZ

Tisztítószer flexibilis endoszkópokhoz. Kizárólag a Soluscope Serie 1 készülékkel használható



SOLUSCOPE SERIE 1

TERMÉKÖSSZETÉTEL

- Nemionos és anionos felületaktív anyagok
- Szekvesztáló összetevő
- Enzimkomplex (proteáz, lipáz, amiláz)
- Segédanyagok

TERMÉKJELLEMZŐK

- Halványsárga, tiszta folyadék
- Sűrűség 20°C-on: 1,09 mg/ml
- A hígított termék pH-ja (0,25%): kb. 8,5
- A hígítatlan termék pH-ja 20°C-on: kb. 6,7*
- A hígított termék pH-ja (0,5%): kb. 7,6*
- Vezetőképeség 0,5%-os hígításban: 231 μ S/cm

* pH-érték mérések üzemi körülmények között hőmérséklet-kompenzációval rendelkező pH-mérővel.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

TERMÉK	KISZERELÉSI EGYSÉG	RENDELÉSI KÓD
SOLUSCOPE EZ	4 x 5 L	3105530

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Csavarja a fekete kupakos dugattyút a kannára. Győződjön meg róla, hogy a légtelenítőnyílás nincs elzárva. Helyezze a kannát a helyére, és csatlakoztassa a mosogatógéphez (lásd a mosogatógép használati útmutatóját). Automatizált hígítás. Felbontás utáni eltarthatósági idő: 2 hónap, amíg a mosogatógéphez csatlakoztatva van (a felbontás dátumát írja fel a címkére az erre a célra szolgáló helyre).

TÁROLÁS

Veszélyes - tartsa be a (vegyi anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó hatályos európai szabályoknak megfelelően összeállított) használati óvintézkedéseket.

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

Kérjük, olvassa el a címkét és a termékinformációkat.



CSAK PROFESSZIONÁLIS
FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Forgalmazza:
ECOLAB GmbH
Rivergate
Handelskai
92 1200 Wien
Ausztria



www.ecolab.com



www.soluscope.com